

身高体重秤使用方法：

■将秤放在硬实、平整的地板上（地板不平或地毯会影响准确度）。

■正常使用时，可直接上秤。

■请平稳地踏上秤面，保持身体平衡，待站稳后，秤即可显示体重和播报体重值，稍等片刻后，秤会再显示身高和播报身高。

■每次测量时，身高显示稳定 10 秒会返回到归零显示，归零显示 8 秒后秤会自动关机。

身高体重秤主要特点

- 1、全自动测量、超声波技术测量身高(无触碰式)，精密传感器测量体重、
- 2、仪器功能丰富，操作简单，设计无线遥控测量和手动测量模式、
- 3、检测数据数码(LED)显示，直观清晰、

4、语言自动报告检测结果、

5、串行数据传输功能(RS232)，使与之相连的计算机能够随时掌握测量情况，数据处理方便、

6、特别设计的校准程序使仪器校准操作十分容易、

7、高速热敏打印，电脑自动计算身高体重指数(BMI)、

身高体重秤产品参数：

1、身高测量方式：超声波测距，采用探头，测量数据稳定可靠，并有自动温差补偿功能

2、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

3、血压测量方式：示波测定法

4、体型：国际通用体质指数（BMI）

5、显示方式：数字 LED 大屏幕

6、测量速度：不小于 480 人次/小时

7、打印方式：测量完立即打印，自动裁纸

8、语音提示：有

9、数据输出格式：RS-232

10、电源电压：AC100V-240V50Hz